

CLEANASCOPE^{MC} Advantage

Systeme de transport et de stockage à court terme | **Séchage et stockage**





LE CERCLE COMPLET DE PROTECTION

Chef de file mondial en prévention des infections, seule Cantel propose le cercle complet de protection, dans un partenariat proactif optimal destiné à vous aider à supprimer le risque infectieux, rationaliser l'efficacité opérationnelle et optimiser votre réussite.

Identification claire des endoscopes propres et contaminés



La confiance, c'est de savoir en un coup d'œil lequel est le propre

Le système de transport et de stockage à court terme CLEANASCOPE^{MC} Advantage protège vos endoscopes et autres appareils délicats en réduisant la manipulation directe et le contact avec les contaminants atmosphériques.

Sa conception brevetée crée un environnement protecteur pour chaque endoscope désinfecté. Les chemises protectrices verte (propre) et rouge (contaminé) permettent d'identifier immédiatement l'appareil propre ou contaminé.

Le flux de travail optimisé de l'endoscope maximise la prévention





SÉCHAGE ET STOCKAGE

Les bactéries posent un risque important pour les endoscopes lors de leur stockage. Les solutions de transport, de séchage et de stockage de Cantel sont destinées à protéger ces dispositifs précieux, réduire les points de contact pour la contamination croisée, éliminer l'humidité dans les canaux de l'endoscope et contrôler l'humidité. L'humidité plus élevée ou l'humidité dans les canaux d'endoscope est connue pour favoriser la croissance bactérienne.

CLEANASCOPE^{MC} Advantage

Systeme de transport et de stockage à court terme | **Séchage et stockage**

Les plateaux s'intègrent parfaitement dans le chariot profilé

Permet le stockage protégé à court terme des endoscopes et de l'équipement propres

Couvercles rigides disponibles pour une protection accrue lors du transport à l'extérieur

Disponible en 5, 6 et 10 plateaux



Le plateau réutilisable robuste s'adapte facilement aux grands endoscopes et à la cassette LDE ADVANTAGE PLUS^{MC}



Paquet à trois parties de chemises stériles à usage unique pour réduire le risque de contamination croisée

Grandes roulettes à blocage pour un transport facile et en douceur

des infections

Après la procédure, rincez et essuyez l'endoscope à l'aide du détergent INTERCEPT^{MC} et placez l'endoscope sale dans le plateau. Couvrez le plateau avec la chemise rouge pour indiquer clairement qu'il s'agit d'un endoscope « CONTAMINÉ ».



TRANSPORT D'ENDOSCOPES CONTAMINÉS



NETTOYAGE MANUEL



SE POSE PARFAITEMENT DANS LE LDE ADVANTAGE^{MC} PLUS



Pour commander des chariots CLEANASCOPE[™] Advantage

Numéro de pièce	Description du produit	Dimensions
103470	Chariot à cinq plateaux (plateaux inclus)	34,7H x 25,2W x 22,1 P po
103466	Chariot à six plateaux (plateaux inclus)	40,5H x 25,2W x 22,1 P po
103467	Chariot à dix plateaux (plateaux inclus)	63,5H x 25,2W x 22,1 P po



« Les endoscopes pré nettoyés doivent être transportés jusqu'à l'aire de retraitement dans des contenants fermés étanches identifiés comme tant contaminés ... L'utilisation d'identifiants uniques facilite la traçabilité des endoscopes souples en cas de défaillance dans le système de retraitement ».

Norme nationale du Canada CAN/CSA-Z314-18,
Retraitement des dispositifs médicaux au Canada

Pour commander des chemises et des accessoires CLEANASCOPE[™]

Part Number	Product Description	Units Per Box
103585	Ensemble de chemises stériles	200 chemises stériles / boîte
103604	Distributrice murale	1
103456	Plateau	1
103457	Couvercle de plateau, transparent	1
CAS-1000	Cassette Advantage	1

« Le système de chemise stérile est l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles de nombreux établissements adoptent le système CLEANASCOPE[™] - les chemises à code de couleur simplifient le retraitement des endoscopes ».

Libby Thomson, ancienne infirmière en chef, centre de dépistage du cancer de l'intestin et infirmière endoscopiste

ADVANTAGE PLUS[™] et INTERCEPT[™] sont des marques de commerce de Medivators Inc.
CLEANASCOPE[™] est une marque de commerce de Cantel (R.-U.) Limited.

www.cantelcanada.com

PASSER UNE COMMANDE

tél : 1.844.348.5636 téléc : 1.844.348.5637 courriel : orders@cantelmedical.ca

© 2017 Medivators Inc. P/N 50098-950C-ENCAN

